


Istruzioni per l'uso

Elettrodi tessili Saalio®

- Elettrodo per viso Saalio® (Cod. Art. 07-01-028-01)
- Elettrodo per fronte Saalio® (Cod. Art. 07-01-028-04)
- Elettrodo per nuca Saalio® (Cod. Art. 07-01-028-03)
- Elettrodo universale Saalio® (Cod. Art. 07-01-028-02)
- Elettrodo per corpo (paio) Saalio® (Cod. Art. 07-01-028-05)

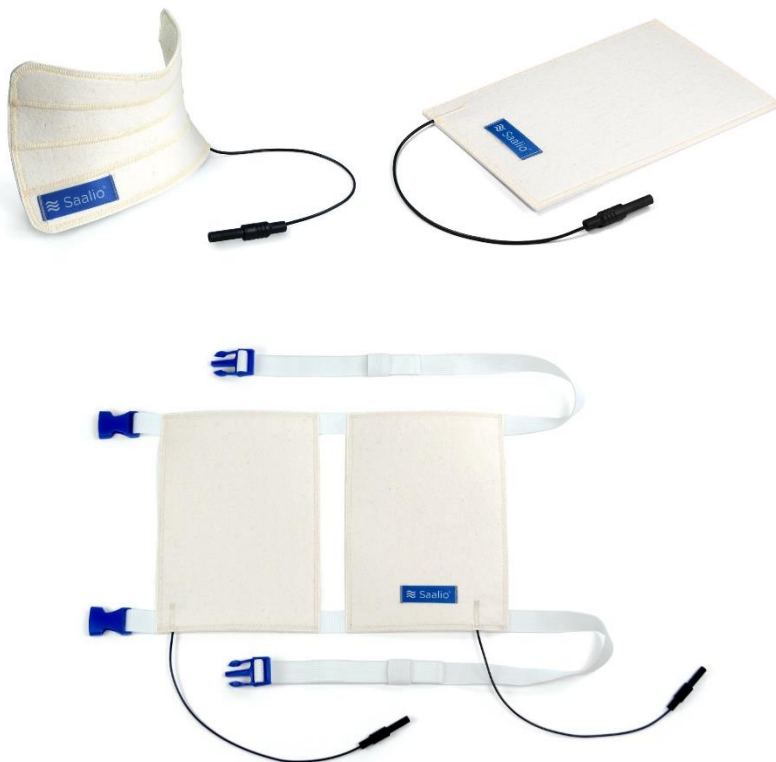



Ringraziamo per la fiducia riposta nei dispositivi terapeutici Saalmann®. Gli elettrodi tessili Saalio® devono essere abbinati esclusivamente a uno dei due dispositivi Saalio elencati di seguito.:

- Saalio® DE (mani e piedi) Cod. art. 07-01-000-01
- Saalio® AX (ascelle) Cod. Art. 07-01-000-07

Le presenti istruzioni per l'uso e le istruzioni per l'uso dei dispositivi Saalio contengono importanti indicazioni per l'effettuazione del trattamento.

Vi preghiamo di leggere con la massima attenzione entrambe le istruzioni per l'uso.

Sommario

1 Contenuto della confezione.....	4
2 Prodotti abbinabili, accessori e parti di ricambio	4
3 Indicazioni di sicurezza	4
4 Spiegazione dei simboli.....	6
5 Uso corretto.....	7
6 Effetto terapeutico	7
7 Destinazione d'uso e indicazioni	8
8 Controindicazioni ed effetti collaterali	8
9 Messa in esercizio.....	10
10 Montaggio dell'apparecchio.....	10
10.1 Elettrodo per viso, fronte, nuca ed elettrodo universale.....	11
10.2 Elettrodi per il corpo (paio)	14
11 Effettuazione della terapia.....	16
11.1 Impostazioni sull'apparecchio.....	16
11.2 Effettuazione della terapia	18
11.3 Fasi della terapia	18
12 Asciugatura e pulizia	19
13 Trasporto e conservazione.....	19
14 Check list errori	20
15 Ciclo di vita e durata.....	20
16 Garanzia.....	20
17 Avvertenze sullo smaltimento.....	20
18 Dati di contatto del Produttore	20

1 Contenuto della confezione

Saalio® Elettrodo per viso	Cod. art. 07-01-028-01
Saalio® Elettrodo per fronte	Cod. art. 07-01-028-04
Saalio® Elettrodo per nuca	Cod. art. 07-01-028-03
Saalio® Elettrodo universale	Cod. art. 07-01-028-02
Saalio® Elettrodo per corpo (paio)	Cod. art. 07-01-028-05

2 Prodotti abbinabili, accessori e parti di ricambio

Gli elettrodi tessili Saalio debbono essere abbinati e utilizzati esclusivamente con il dispositivo Saalio® DE o Saalio® AX.

(non sono accessori o parti di ricambio)

3 Indicazioni di sicurezza



Utilizzare gli elettrodi tessili solo in abbinamento con l'apparecchio Saalio DE o Saalio AX. L'abbinamento ad altri apparecchi o elettrodi potrebbero comportare rischi per l'utilizzatore e causarne persino la morte e invalida immediatamente la garanzia.



Prima del trattamento togliere tutti i gioielli di metallo (anelli, orologi, bracciali), in quanto la concentrazione dell'elettricità su questi punti potrebbe causare ustioni o lesioni da elettricità.



In presenza di ferite cutanee aperte, si raccomanda di ricoprirle con vaselina per isolarle dal flusso di elettricità.



Le lesioni cutanee possono guarire con più difficoltà in pazienti con immunodeficienza o pazienti anziani o malati di diabete e causare addirittura gravi infezioni.



Accendere e spegnere l'apparecchio solo se gli elettrodi non sono stati posizionati. Tutte le funzioni di sicurezza dell'apparecchio funzionano solo con apparecchio acceso.



Durante il trattamento e in dipendenza della carica elettrica si potranno avvertire spiacevoli sensazioni di formicolio o bruciore.



Se la dose di corrente selezionata è troppo elevata, si potrebbero avvertire sensazioni di dolore nelle zone trattate.



Gli elettrodi possono essere rimossi in qualsiasi momento. In rari casi possono verificarsi spiacevoli scosse elettriche, ma non sono pericolose.



Durante i primi trattamenti, la sudorazione potrebbe peggiorare. L'effetto dovrebbe scomparire spontaneamente dopo alcuni trattamenti.



Sulla cute trattata potrebbero comparire segni di secchezza come desquamazione o piccole lacerazioni cutanee. In tal caso si consiglia di applicare **dopo** il trattamento una crema con azione idratante.



Subito dopo il trattamento potrebbero comparire, nell'area trattata, arrossamenti e raramente anche vescicole. Esse scompariranno completamente. Si potrà ridurre la comparsa di tali effetti riducendo la dose di corrente terapeutica. Prima di ripetere il trattamento bisognerà aspettare che la cute guarisca completamente. In caso di un'improvvisa grave reazione cutanea si raccomanda di consultare un medico prima di ripetere il trattamento.



Non utilizzare due apparecchi contemporaneamente.
Non manomettere l'apparecchio.



Proteggere l'apparecchio dalla portata dei bambini, non lasciarlo incustodito: pericolo di strangolamento e ferite.



Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchio, staccare tutte le spine e spegnere l'apparecchio. Utilizzare un panno morbido, umido e un detergente delicato per la pulizia del dispositivo terapeutico.



Non piegare eccessivamente il cavo o gli elettrodi e non sottoporli a fonti di calore o ad agenti chimici. Se il cavo o un elettrodo è danneggiato, farlo esaminare alla Saalmann®.

4 Spiegazione dei simboli

Simboli utilizzati nelle istruzioni per l'uso e sull'etichetta:



Attenzione:
importante
indicazione



Dispositivo medico



Leggere le istruzioni
per l'uso!



Dichiarazione CE del
Produttore



Codice art.



N. lotto



Produttore

5 Uso corretto

Gli elettrodi tessili sono stati ideati per essere utilizzati in locali chiusi e dovrebbero essere utilizzati per la terapia solo in ambienti asciutti. Attenersi inoltre alle avvertenze sulla messa in esercizio indicate al punto 9.

All'inizio del trattamento si consiglia di usare il dispositivo quattro volte la settimana e al massimo una volta al giorno per circa 15 minuti. Dopo circa 10 trattamenti, la secrezione di sudore dovrebbe normalizzarsi. Poiché la terapia ha un carattere reversibile è necessario effettuare una terapia di lungo termine (terapia di mantenimento). A seconda della gravità dei sintomi sarà necessario ripetere il trattamento una-due volte la settimana per circa 15-20 minuti. Per la pulizia e disinfezione dell'apparecchio si vedano le avvertenze del punto 12.

Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi quali "utilizzo non corretto". Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose che risultino o possano risultare da un "utilizzo non corretto" e dalla mancata adesione alle raccomandazioni terapeutiche.

6 Effetto terapeutico

L'effetto terapeutico della ionoforesi con acqua di rubinetto è stato dimostrato da numerosi studi medici, ma non sono state ancora appurate scientificamente le modalità di tale trattamento. I medici suppongono che le terminazioni pre-sinaptiche dei nervi delle ghiandole sudorifere vengono irritate dalla corrente elettrica e di conseguenza non vengono più stimolate a produrre sudore. In altre parole, il trattamento non interessa la ghiandola sudorifera ma solo la "conduzione" nervosa. **L'effetto terapeutico si produce solo dopo diversi trattamenti ed è di natura reversibile, motivo per cui è necessario ripetere periodicamente il trattamento.**

La dose di corrente elettrica deve essere adeguata alla percezione personale ed è limitata a valori massimi, per cui non sussiste alcun rischio.

7 Destinazione d'uso e indicazioni

Gli elettrodi tessili Saalio® devono essere utilizzati con il kit Saalio® DE (mani e piedi) o con il set Saalio® AX (ascelle) per consentire l'applicazione del dispositivo di ionoforesi con acqua di rubinetto su diverse parti del corpo: viso, nuca, busto.

La ionoforesi con acqua di rubinetto serve al trattamento della **iperidrosi primaria**, con una corrente di trattamento continua o pulsante che viene convogliata sulle parti del corpo interessate. Tale corrente viene prodotta grazie al contatto con l'acqua (bagno d'acqua o elettrodi tessili o panni spugnosi preventivamente bagnati) ed ha come effetto la riduzione della secrezione di sudore sulle parti cutanee trattate.

Il trattamento viene effettuato su persone che, indipendentemente dal sesso, soffrono di un'eccessiva, patologica, sudorazione alle mani, piedi o ascelle. Queste persone dovranno poter percepire il dolore provocato dalla corrente e decidere in modo autonomo in merito all'intensità di trattamento e all'interruzione dello stesso. Prendere atto, inoltre, delle controindicazioni.

L'apparecchio può essere utilizzato anche da persone non esperte e non necessita di un particolare addestramento. Iniziare il trattamento solo dopo aver letto con attenzione e capito tutte le istruzioni per l'uso. In caso di dubbi contattare il Produttore o il medico curante.

8 Controindicazioni ed effetti collaterali



Non usare in **nessun caso** la ionoforesi nei seguenti casi:

- Portatore/Portatrice di pace-maker
- Portatore/Portatrice di defibrillatore impiantabile (ICD)
- Gravidanza
- Spirale (dispositivo intrauterino) - solo per il trattamento dei piedi
- Impianti metallici ed altri oggetti conduttori di elettricità nel/sul corpo in punti nei quali la corrente elettrica passa tra

i due elettrodi (ad es. impianti dentali, inlays, apparecchi per i denti e piercing).

- Patologie o lesioni cutanei (ferite) che non possono essere ricoperte con vaselina
- Utilizzatori/utilizzatrici che soffrono di aritmia cardiaca
- Utilizzatori/utilizzatrici che soffrono di malattie neurologiche (ad esempio epilessia o sensibilità limitata)
- Utilizzatori/utilizzatrici con patologie maligne nell'area di trattamento
- Utilizzatori/utilizzatrici con gravi infiammazioni locali o trombosi (coaguli di sangue)
- Utilizzatori/utilizzatrici con gravi malattie di circolazione
- Bambini e ragazzi fino all'età di 18 anni



I seguenti effetti collaterali possono comparire:

- Sensazione di formicolio o bruciore durante la terapia, dovuta a dosi troppo elevate di corrente elettrica o lesioni cutanee
- Leggera scossa di corrente (non pericolosa) in caso di interruzione della terapia
- Pelle secca o prurito dopo il trattamento
- Arrossamento di breve durata dopo il trattamento in seguito all'aumento della vascolarizzazione risultante dalla ionoforesi o da dosi più elevate di corrente lungo la linea d'acqua.
- Formazione di vescicole reversibili
- Ustioni o lesioni da elettricità dovute a un'elevata dose di corrente elettrica su determinati punti (ad esempio contatto diretto della pelle con l'elettrodo)
- Gusto metallico in bocca (nelle applicazioni degli elettrodi su viso e fronte), evitabile cambiando la direzione della corrente.

9 Messa in esercizio

Gli elettrodi tessili devono essere in condizioni perfette per garantirne un funzionamento sicuro. Prima di mettere in esercizio l'apparecchio controllare la presenza di eventuali danni. Se l'apparecchio è difettoso, non utilizzarlo. Attenersi alle avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso. Spegnere l'apparecchio al termine della terapia.

10 Montaggio dell'apparecchio

L'apparecchio Saalio deve essere utilizzato con solo un elettrodo e un controelettrodo. Per un utilizzo sicuro attenersi esclusivamente alle seguenti configurazioni di elettrodi.

Parti del corpo	Elettrodo	Controelettrodo
Viso	Elettrodo viso	Kit vaschetta per mani e piedi *
Fronte	Elettrodo fronte	Kit vaschetta per mani e piedi *
Nuca	Elettrodo nuca	Kit vaschetta per mani e piedi *
Altre parti del corpo	Elettrodo universale	Elettrodo universale o kit vaschetta per mani e piedi *
Busto	Elettrodo corpo (comprende entrambi gli elettrodi)	



Kit vaschetta come controelettrodo

10.1 Elettrodo per viso, fronte, nuca ed elettrodo universale

Durante l'applicazione degli elettrodi tessili (elettrodo per viso, fronte, nuca o elettrodo universale) che rappresentano una superficie di contatto elettrica verso l'apparecchio, le mani e i piedi (vaschetta) fungeranno da seconda area di contatto che consentirà alla corrente elettrica di passare attraverso il corpo. Tale configurazione è in linea di massima uguale a quella del trattamento abbinato di mani e piedi. Predisporre l'apparecchio nel seguente ordine:

1. Accendere il dispositivo centrale di comando dopo aver collegato l'alimentatore.
2. Preparare una vaschetta come indicato nelle istruzioni per l'uso del kit Saalio® per il trattamento delle mani e dei piedi. Essa servirà come controelettrodo nei confronti dell'elettrodo tessile. Connettere l'elettrodo al dispositivo centrale di comando.
3. Riempire anche l'altra vaschetta con acqua di rubinetto. In questa vaschetta metterete l'elettrodo tessile in modo che possa essere inzuppato completamente di acqua. L'elettrodo tessile verrà quindi collegato al dispositivo centrale di comando.



Un consiglio

Utilizzare acqua di rubinetto calda. È più piacevole sulla pelle.

4. Controelettrodi
 - 4.1 Se desiderate utilizzare le mani o anche una sola mano come contro elettrodo, potrete disporre la vaschetta su un tavolino di fronte a voi.
 - 4.2 Se desiderate usare i piedi come contro elettrodo, potrete posizionare la vaschetta predisposta (con elettrodo per vaschetta ed asciugamano) a terra, davanti a voi. Prendere ora la seconda vaschetta, dove si trova a bagno l'elettrodo tessile e disporla sul tavolo davanti a voi.
5. Coprire con un asciugamano le altre parti del corpo, per evitare che si bagnino con l'acqua.
6. Estrarre l'elettrodo tessile dall'acqua, strizzarlo fino a quando non fuoriuscirà più acqua e posizionarlo.
7. È possibile fissare gli elettrodi tessili con le cinghiette (se disponibili). Stringere le cinghiette solo nella misura necessaria, in modo che rimanga sufficiente acqua nell'asciugamano per consentire una densità uniforme di corrente elettrica. L'elettrodo tessile dovrebbe poggiare per quanto possibile in modo uniforme soprattutto nelle zone dove si suda di più.

Se alcune parti dell'elettrodo tessile inizialmente non poggiano del tutto (ad es. il bordo del naso nel caso dell'elettrodo per il viso), potrete premerlo con la mano per breve tempo. Se l'elettrodo è sufficientemente bagnato e le divergenze geometriche non sono troppo grandi, il panno spugnoso aderirà di regola sulla zona del corpo.



Un consiglio:

- Utilizzare i piedi come controelettrodi. In tal modo avrete le mani libere per modificare l'intensità della corrente elettrica, correggere la posizione dell'elettrodo tessile oppure se inizialmente è necessario premere l'elettrodo su singole parti del corpo.
- Utilizzare uno specchio per controllare la posizione dell'elettrodo tessile e per ottimizzarla. Potrete chiedere anche a un'altra persona di aiutarvi.
- Iniziare la terapia tempestivamente, dopo aver posizionato l'elettrodo tessile bagnato. Più l'elettrodo è bagnato, migliore sarà la conduttività e di conseguenza la distribuzione della corrente elettrica sulla pelle.

10.2 Elettrodi per il corpo (paio)

La corrente elettrica entra e fuoriesce dal corpo attraverso i due elettrodi collegati con una cinghietta. Non sarà necessario usare un altro controelettrodo. Predisporre l'apparecchio nel seguente ordine:

1. Accendere il dispositivo centrale di comando dopo aver collegato l'alimentatore. Impostare i parametri desiderati sull'apparecchio. Premere almeno una volta il tasto Set per avviare automaticamente la terapia.
2. Connettere entrambi i cavi dell'elettrodo al dispositivo centrale di comando.
3. Bagnare entrambi gli elettrodi universali, fino a quando saranno completamente imbevuti d'acqua.
4. Posizionare i due elettrodi sul corpo e fissarli usando le cinghiette elastiche. Stringere leggermente le cinghiette in modo tale che gli elettrodi non possano spostarsi. (se le cinghiette sono troppo strette, l'apporto della corrente elettrica potrebbe essere non uniforme).
5. Collegare i due elettrodi universali con i cavi per elettrodi. Appena il secondo elettrodo sarà collegato, il circuito elettrico verrà chiuso e la terapia inizierà automaticamente.

Un consiglio:

- Utilizzare acqua di rubinetto calda. È più piacevole sulla pelle.
- Gli elettrodi devono poggiare in modo per quanto possibile uniforme per consentire un apporto di corrente elettrica omogeneo su tutta l'area. Gli elettrodi bagnati e quindi pesanti dovranno essere posizionati orizzontalmente rispetto alla pelle. Sdraiarsi durante la terapia per consentire agli elettrodi di rimanere in alto.
- Iniziare la terapia tempestivamente, dopo aver posizionato l'elettrodo tessile bagnato. Più l'elettrodo è bagnato, migliore sarà la conduttività e di conseguenza la distribuzione della corrente elettrica sulla pelle.
- Coprire con un asciugamano le altre parti del corpo, per evitare che si bagnino con l'acqua.



11 Effettuazione della terapia

L'effettuazione della terapia con un elettrodo tessile non differisce in linea di massima da quella per le mani, piedi o ascelle. Poiché le zone del corpo interessate e la pelle potrebbero reagire in modo più sensibile alla corrente elettrica, in particolare all'inizio della terapia, si dovrebbero adottare particolari misure precauzionali e attenersi alle nostre raccomandazioni.

Non effettuare il trattamento sul viso dopo averlo rasato. In tal caso la corrente elettrica potrebbe passare facilmente attraverso piccoli graffi sulla pelle, causando in quei punti maggiore dolore.

Rimuovere prima del trattamento tutti i cosmetici e prodotti per la cura contenenti grassi. Si consiglia di lavare le relative parti del corpo prima del trattamento usando semplicemente acqua e sapone per rimuovere residui di grasso e sebo. Una pellicola anche sottile di grasso potrebbe causare resistenze molto maggiori e far sì che la corrente elettrica in questi punti venga molto ridotta.

Non usare saponette cremose.

La ionoforesi con acqua di rubinetto può causare, se ripetuta frequentemente, soprattutto all'inizio, secchezza della pelle. Si consiglia pertanto di applicare subito dopo la terapia sulla pelle un idoneo prodotto per la cura.

11.1 Impostazioni sull'apparecchio

Durata della terapia [min:sec]

Iniziare, nella prima seduta terapeutica, con 2 minuti, per poter constatare per tempo possibili reazioni indesiderate della pelle. Rimuove a tal fine l'elettrodo tessile. Un arrossamento della pelle è normale ed è dovuto al miglioramento della vascolarizzazione e dovrebbe



scompare dopo 1-2 ore. Aumentare la durata della terapia successivamente gradualmente di altri 5 minuti, sempre controllando le reazioni sulla pelle. Se dopo i primi 12 minuti (2 + 5 + 5 min), oltre al normale arrossamento della pelle, non compaiono altre reazioni, si potrà aumentare la durata della terapia fino a raggiungere la durata massima di 15 minuti.

Se si constatano reazioni della pelle, aspettare che esse scompaiano del tutto prima di iniziare di nuovo con la terapia con una corrente di minore intensità.

Corrente terapeutica [mA]

Impostare per la prima applicazione l'intensità della corrente su 1 mA, prima di applicare l'elettrodo tessile inzuppato di acqua. L'apparecchio, una volta che il circuito verrà chiuso con le mani o i piedi, si avvierà automaticamente. Aumentare quindi l'intensità della corrente gradualmente senza però avvertire un fastidioso formicolio o addirittura dolore.

Il modo con il quale si reagisce alla corrente elettrica varia da persona a persona e cambia anche di regola nel corso della terapia (effetto di assuefazione). Di regola consigliamo di impostare l'intensità della corrente a valori superiori di **10 mA con corrente continua e 15 mA con corrente pulsante solo dopo aver acquisito una certa esperienza con la terapia (almeno 10 sedute)**.

Tipo di corrente [CC/CP]

All'inizio della terapia è da preferire l'uso con corrente continua per la sua maggiore efficacia. Se si prova dolore anche con basse intensità di corrente elettrica (poche mA) o se la pelle reagisce in modo eccessivo, sarà meglio impostare la corrente pulsante.

Anche in seguito, quando si effettuerà una terapia di mantenimento, sarà meglio usare la corrente pulsante al posto di quella continua.

Direzione della corrente [E1/E2]

Nel trattamento con elettrodi tessili non si consiglia di passare da una direzione di corrente all'altra, come si fa per il trattamento parallelo degli arti (mani, piedi, ascelle). Si consiglia di impostare la direzione della corrente elettrica in modo tale che sull'elettrodo tessile si avrà un maggiore effetto rispetto al

controlettrodo. A tal fine sarà necessaria la seguente impostazione e connessione del cavo:

E1 (elettrodo tessile) >> E2 (mani o piedi)

È anche possibile cambiare la direzione della corrente per variare la percezione della corrente elettrica oppure per ridurre al minimo il tipico gusto metallico che si sente in bocca quando si applica l'elettrodo per il viso o per la fronte e che compare appena la corrente inizia a fluire. Il gusto metallico non dipende - in base alle nostre esperienze - da otturazioni dentali o simili ma principalmente dalla direzione della corrente.

11.2 Effettuazione della terapia

Per l'effettuazione della terapia attenersi alle istruzioni per l'uso dell'apparecchio Saalio® (cap. 11.2)-

Avvertenza importante! All'inizio della seduta terapeutica accendere **sempre per prima cosa il dispositivo centrale di comando** e solo dopo applicare l'elettrodo tessile e mettere le mani o i piedi nella vaschetta.

Al termine della seduta e quando si vuole interromperla (pausa), rimuovere per primi gli elettrodi e le mani/i piedi dalla vaschetta, staccare i cavi degli elettrodi dagli elettrodi e solo **per ultimo spegnere il dispositivo centrale di comando**.

11.3 Fasi della terapia

Oltre alla fase iniziale e di mantenimento (vedi istruzioni per l'uso dei kit Saalio®), effettuare in precedenza una terza, breve, fase di prova, per poter riscontrare per tempo effetti collaterali indesiderati e rischi. Effettuare le prime applicazioni, pertanto, solo per una breve durata (2, 5 e successivamente 10 minuti) a basse intensità di corrente elettrica (2, 4 e 6 mA). Solo dopo, aumentare gradualmente durante la fase iniziale, la durata della terapia e se del caso la corrente terapeutica fino a ottenere l'effetto terapeutico desiderato.

Determinare in tal modo la "propria corrente" sull'area del corpo interessata (viso, fronte, nuca, ecc.) che dovrebbe essere percepibile ma in modo accettabile e non fastidioso.

Come per le altre parti del corpo, la terapia con un elettrodo tessile consiste, nelle fasi successive, di una fase iniziale e una di mantenimento. Per la durata e la frequenza delle applicazioni si vedano le istruzioni per l'uso dell'apparecchio Saalio.

Un consiglio

Effettuare la terapia preferibilmente nella prima serata. Per prima cosa la pelle avrà sufficiente tempo per rigenerarsi dopo la rasatura mattutina. Per seconda cosa gli arrossamenti della pelle causati dalla maggiore vascolarizzazione dell'area che scompaiono abbastanza rapidamente si tollerano meglio di sera.

12 Asciugatura e pulizia

Al termine del trattamento, riporre gli elettrodi tessili su un asciugamano asciutto e strizzarli in modo che l'asciugamano possa assorbire l'umidità. Evitare però di strizzare eccessivamente l'elettrodo tessile in quanto potrebbe esserne danneggiato.

Disporre l'elettrodo tessile (ancora) bagnato in un posto caldo e asciutto in modo che possa asciugarsi rapidamente. Durante l'asciugatura, l'elettrodo tessile si restringerà e si irrigidirà. Non deformare più del necessario l'elettrodo tessile asciutto e rigido in quanto potrebbe strapparsi. Appena l'elettrodo tessile entrerà nuovamente in contatto con l'acqua, diventerà nuovamente morbido e flessibile.

Gli elettrodi tessili possono essere lavati a mano o in lavatrice (inserirli in un retino) a una temperatura max di 30°C. Non centrifugare gli elettrodi tessili ma appenderli bagnati per farli asciugare. Per non ridurre più del necessario il ciclo di vita degli elettrodi tessili si consiglia di lavarli solo se necessario.

13 Trasporto e conservazione

Riporre via gli elettrodi tessili solo quando sono asciutti. Non deformare più gli elettrodi tessili una volta asciugati, in quanto essi potrebbero strapparsi.

Non esporre gli elettrodi tessili alla diretta luce del sole.

14 Check list errori

Se l'apparecchio dovesse, prima, durante o dopo un trattamento, non funzionare come indicato nelle presenti istruzioni per l'uso, si consiglia di leggere la check list dell'apparecchio Saalio (Cap. 14).

15 Ciclo di vita e durata

Il ciclo di vita degli elettrodi tessili è limitato, per via della loro struttura tessile, con un uso normale, a 12 mesi.

16 Garanzia

Gli elettrodi tessili Saalio® sono da considerarsi, alla stregua dei contenitori di spugna e asciugamani, parti soggette ad usura e sono coperti dalla garanzia per un anno. Se doveste riscontrare un errore di materiale o di fabbricazione prima del primo utilizzo, vi preghiamo di volerli contattare. I nostri contatti sono riportati nelle presenti istruzioni per l'uso.

17 Avvertenze sullo smaltimento

Gli elettrodi tessili possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

18 Dati di contatto del Produttore



Saalmann medical GmbH & CO KG
Südbahnstraße 34
D-32547 Bad Oeynhausen
Mail info@saalmann-medical.de
Tel +49 (0)5731 / 25450-0
Fax +49 (0)5731 / 25450-11